



#### DESEMPAQUETAR


Saque su Kardia Mobile de su caja. Kardia Mobile lleva incorporada la carcasa que se puede adherir a la parte trasera del Smartphone o Tablet.

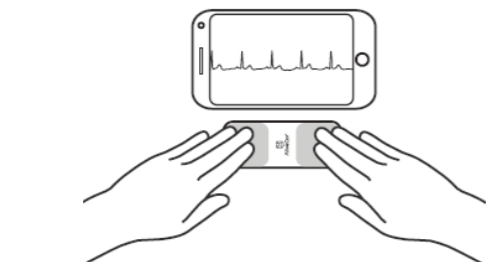

**AVISO:** Algunos usuarios prefieren no adherir Kardia Mobile al Smartphone o Tablet, y esa es otra opción. Kardia Mobile también funciona de forma correcta cuando el dispositivo se encuentra a 30cm o menos de su Smartphone o Tablet.

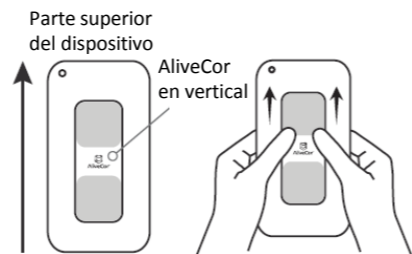

La dirección es importante. Retire el adhesivo de la parte trasera de la carcasa de Kardia Mobile, para poder pegarla en la parte trasera de su Smartphone o Tablet, compruebe que la palabra "AliveCor" está en el centro y derecha (véase la imagen).

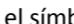En el caso de los dispositivos con el símbolo de Kardia , éste deberá colocarse de forma que la "K" de Kardia esté más próxima a la parte superior del Smartphone (donde suele encontrarse la cámara) y la "a" se encuentre más próxima a la parte inferior.

**AVISO:** Si ha comprado un nuevo Smartphone o Tablet (o carcasa), Kardia Mobile puede ir con usted. Para despegar su Kardia Mobile de la carcasa, use sus pulgares para deslizar el dispositivo hacia la parte abierta de la carcasa de Kardia.

Aunque el adhesivo está diseñado para un solo uso, la carcasa adicional está disponible por un bajo coste en tienda.alivehs.com en España.




#### CREE UNA CUENTA

Primero, asegúrese de que Kardia Mobile está conectado a Internet. Busque Kardia en la tienda de Google Play™ o en la tienda Apple Store e instale la App Kardia. Si está usando un iPad Air o iPad mini, seleccione "Solo iPhone" en la esquina superior izquierda de la App Store para encontrar la App Kardia para iPhone.

**AVISO:** Si durante la instalación de la app le solicita acceso al micrófono, por favor permítalo. Kardia Mobile funciona con el micrófono para conectarse a su Smartphone o Tablet.


Abra la app Kardia y siga las instrucciones para crear la cuenta Kardia. Como parte de la configuración, le solicitarán que se realice su primer registro.

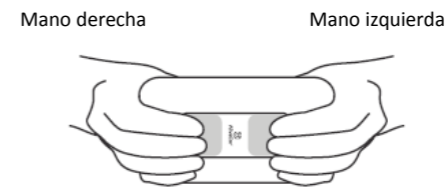

#### LA POSICIÓN DE LOS DEDOS

Coloque dos o más dedos (no importa cuáles) de cada mano en los electrodos durante 30 segundos. Mientras esté registrando, trate de relajar sus brazos y no se mueva.

**AVISO:** Cada vez que haga un registro, su mano izquierda ha de estar en la parte superior de su teléfono (cerca de la cámara) y su mano derecha ha de colocarse en la parte inferior.

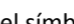Tal y como indicábamos, si no ha adherido el dispositivo al Smartphone o Tablet, puede realizarse el registro igualmente, en ese caso deberá situar los dedos de la mano derecha en el electrodo más cercano a la palabra AliveCor, y la izquierda al lado del símbolo. En el caso de tratarse del dispositivo con el símbolo  y la palabra Kardia, ha de colocar el dispositivo sobre un soporte plano, de forma que lea correctamente Kardia.



#### LLEVE UN DIARIO DE SUS REGISTROS O COMPÁRTALOS CON SU MÉDICO

Con Kardia Mobile podrá registrar sus ECG en el instante y lugar que desee. La app Kardia permite compartir sus electrocardiogramas con su médico al instante, o bien almacenar los registros para futuras citas.

Si desea contactar con algún cardiólogo, y no conoce ninguno, póngase en contacto con nosotros en [info@alivehs.com](mailto:info@alivehs.com) y le indicaremos el contacto de uno de nuestros cardiólogos, en función de su zona geográfica.

Si tiene algún problema con su Kardia Mobile, contacte con nosotros:

[info@alivehs.com](mailto:info@alivehs.com)

96.361.59.85

El servicio de atención al cliente de Alive Health Systems está disponible de lunes a viernes laborables, de 9:00 a 13:00

[www.alivehs.com](http://www.alivehs.com)